




IMPLANT CARD

种植体保养手册




感谢您为新的义齿选择Ticare种植体!我们与种植领域的专家一起探寻最佳的治疗效果,您的信任是我们前进的动力!

下文提供了关于术后基本护理的小贴士。就像您保护自己的牙齿健康一样,为了避免将来可能出现的并发症,请您谨遵医嘱并参考如下几页的建议,这将帮助您轻松无痛的进行术后恢复。

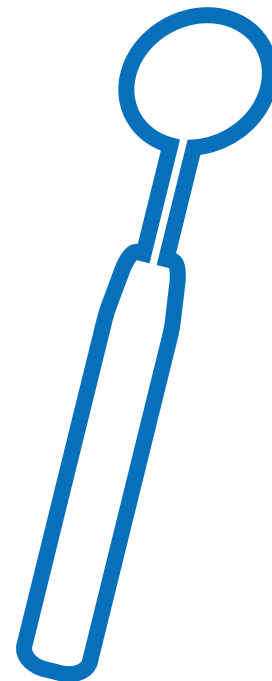


您术后返回家中, 请放松身心, 保证休息, 尽快冷敷治疗区域的外部, 减少肿胀或疼痛。冰敷10-15分钟, 然后休息几分钟, 尽可能重复该步骤。

把冰块用布包起来, 以免直接接触皮肤。

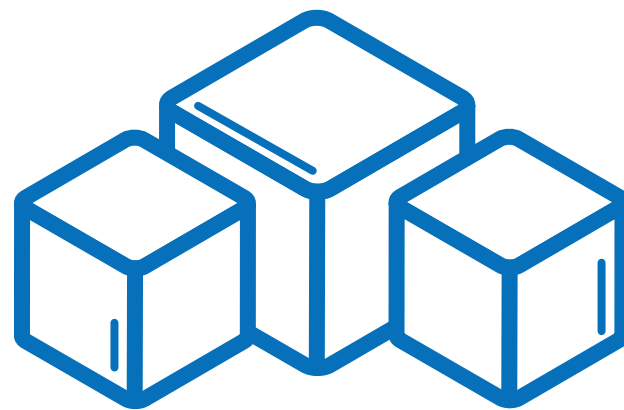


2

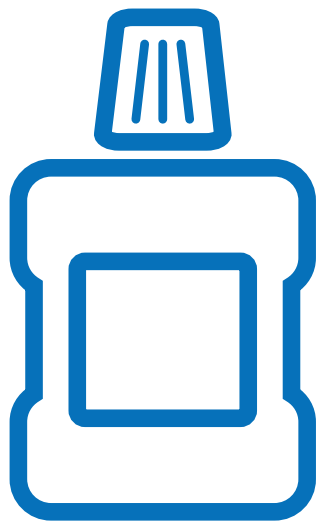

术后24小时不要用力冲洗,也不要吐口水,
以免影响伤口愈合。

手术后30分钟内咬住敷在伤口的纱布, 以便止血。
如纱布取出后仍有轻微出血, 请重复上述步骤。
如出血严重, 应立即与牙科诊所联系。

3

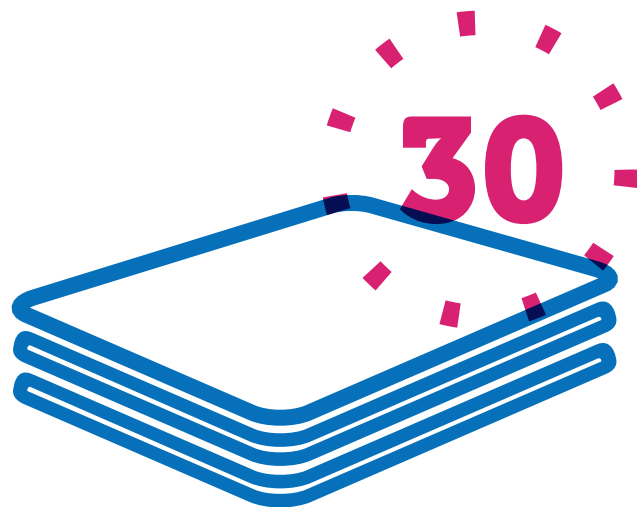

4

如果手术后数小时或三天内出现轻微肿胀或瘀青，不要惊慌，
这是正常现象，几天内就会消退。




手术后一周内不要进行剧烈运动。

5



6

手术后的第一天, 为了减少肿胀和出血, 建议您睡觉时
尽可能抬高头部, 或考虑多放几个枕头。

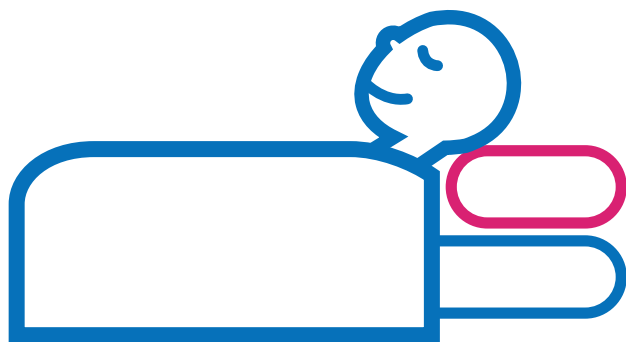

手术后一周内,强烈建议吃软的食物,不要咀嚼坚硬的东西。

可适当食用一些凉的流食,比如冰沙、冰淇淋或酸奶。避免食用热的食物或饮料,不要使用吸管,放慢进食节奏并多加小心,因为热会增加感染的风险。

7



8

手术后一周内, 不要吸烟或饮用含酒精、碳酸或高糖的饮料。



仔细遵照牙医的嘱咐进行术后护理和服用
药物(抗生素、抗过敏药和/或止痛药)。

9





Trust is what makes the patient smile. 您的信任和美丽笑容是我们不断前行的动力

Ticare China | 西班牙莫左格劳股份公司中国代表处

Room 583, 5/F, Block A, Landgentbldg Center, Chaoyang District Beijing 100022 P.R. China

北京市朝阳区乐成中心A座5层583室

E:naomideticareimplants.com



Ticare泰科中国官方微信公众号

www.ticareimplants.cn